

Apósito V.A.C.® Simplace™ Small

Fabricante / Distribuidor Autorizado:

KCI / Medcorp S.A.



Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación

- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp S.A.

Presentación

Unidad estéril o Caja x 5 unidades

Modo de Acción:

Cuando el apósito GRANUFOAM SIMPLACE V.A.C.® ya instalado se colapsa y comprime, gracias a la presión negativa configurada en el equipo, entrar en contacto con el lecho de la herida generando **micro tensión**; aumento de vascularización,

Descripción Técnica:

Nuevo diseño de esponja tradicional de poliuretano. Su forma en espiral simplifica y hace más rápida el proceso de curación y facilita las distintas técnicas en heridas más complejas.

Composición Kit:

1. Contiene dos esponjas de poliuretano 7,7 x 11,2 x 1,75 cm, pre cortada en forma de espiral, poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), que se adapta a los contornos de las heridas profundas e irregulares y fomenta la actividad celular y la formación de tejidos de granulación en las heridas. Posibilidad de recortarla.

2. Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™. Manguera anticolapsable.

3. Estéril. Libre de látex hipoalergénico y componentes tóxicos.

4. De un solo uso.

5. Dos láminas V.A.C.® Drape 12 x 20 cm c/u de plástico adhesivo semi-oclusivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa. Apósito transparente.

Indicaciones:

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras.

Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- ❖ Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.

aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y **macro tensión**; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización.

- ❖ Pacientes con problemas de hemostasia.
- ❖ Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- ❖ Mal nutrición no tratada.
- ❖ Pacientes con mala disposición o agresivos.
- ❖ Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.
- ❖ En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar en combinación con apósito Whitefoam V.A.C.®.

Contraindicaciones:

- ❖ Fístulas no entéricas sin explorar.
- ❖ Osteomielitis no tratada.
- ❖ Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
- ❖ Tejido necrótico con presencia de escaras.
- ❖ Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.



V.A.C.® SIMPLACE™ Kit pequeño: 2 GranuFoam espiral™ (7,7 x 11,2 x 1,75 cm) , 2 tiras de V.A.C.® Drape (12 x 20 cm), 1 SENSAT.R.A.C.™ con conector , 1 regla desechable .

| Opciones de Orden | Código de Producto |
|--------------------|--------------------|
| Unidad – Caja de 5 | M8275046/5 |

