

Apósitos V.A.C.® Whitefoam Large

Fabricante / Distribuidor Autorizado: KCI / Medcorp S.A



Método de Esterilización: Rayos Gamma

Certificación

- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp

Presentación

Unidad estéril o Caja x 10 unidades

Modo de Acción:

Cuando el apósito WHITEFOAM V.A.C.® ya instalado se colapsa y comprime, gracias a la presión negativa configurada en el equipo, entrar en contacto con el lecho de la herida generando **micro tensión**; aumento de vascularización, aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y **macro tensión**; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización.

Descripción Técnica:

Apósito para el uso de injertos de piel, mayor resistencia a la tensión facilita la colocación y la extracción de túneles y socavamientos. Mayor densidad para el crecimiento interno restringido del tejido de granulación lo que permite un cambio del apósito más cómodo. Indicado para heridas con exposición de tejido noble.

Se utiliza en combinación con los demás apósitos V.A.C.® en heridas de mayor superficie. Manteniendo las presiones, beneficios y bioseguridad de nuestros productos.

Composición:

1. Una esponja de Alcohol Polivinilo (PVA) de 10 x 15 x 1 cm, humedecido previamente con agua esterilizada, hidrofílica. Recortable.
2. Con poros cerrados de 0.2mm a 1.0mm
3. Estéril. Libre de látex. Hipoalergénico.
4. Rectangular. De un solo uso

Indicaciones:

Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras.

Heridas con exposición de tejido noble, órganos expuestos, ligamentos, tendones y hueso.

Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- ❖ Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.

- ❖ Pacientes con problemas de hemostasia.
- ❖ Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- ❖ Mal nutrición no tratada.
- ❖ Pacientes con mala disposición o agresivos.
- ❖ Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.

Contraindicaciones:

- ❖ Fístulas no entéricas sin explorar.
 - ❖ Osteomielitis no tratada.
 - ❖ Heridas malignas (excepto para mejor la calidad de vida).
 - ❖ Tejido necrótico con presencia de escaras.
- Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.



V.A.C. WHITEFOAM™ Apósito Large (esponja sola) 1 apósito de alcohol polivinílico (10 x 15 x 1cm)

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad – Caja de 10	M6275034/10

