

**Apósito V.A.C.® VeraFlo™ Cleanse Choice**

Fabricante / Distribuidor Autorizado: KCI / Medcorp S.A.

**Método de Esterilización: Rayos Gamma****Certificación**

- FDA
- ISO 9001/2008
- ISO 13485/2003
- CE: producto sanitario clase IIb
- ISP Medcorp

**Presentación**

Unidad estéril o Caja x 5 unidades

**Modo de Acción:**

Cuando el apósito VERAFLOR V.A.C.® ya instalado, se colapsa y comprime producto de la presión negativa previamente configurada en el equipo, entra en contacto con el lecho de la herida generando **micro tensión**; aumento de vascularización, aumento división celular, extracción del edema circundante, eliminación de mediadores de inflamación, material infeccioso y aumento de tejido de granulación y **macro tensión**; disminución del volumen y diámetro de la herida afrontando bordes y favoreciendo mecanismos para la cicatrización. Este ciclo de presión se combina con ciclos de lavado donde se

**Descripción Técnica:**

*Apósito compatible solo con equipo ULTA® limpia, trata y cicatriza. Utilizado para ciclos de presión negativa combinada con instilación de solución. El apósito V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ ha sido diseñado para facilitar la eliminación de material infeccioso como exudado fibrinoso espeso, esfacelos y otra carga microbiana de la herida de hasta 30 centipoise. Única que desbrida.*

**Composición Kit:**

1. 3 Esponjas de Poliuretano ovaladas de 18 X 12,5 cm; menos hidrofóbica que permite la instilación y distribución de distintas soluciones al lecho de la herida, mayor resistencia a la tracción superior para ayudar a asegurar la completa eliminación de espuma del lecho de la herida. La capa de contacto en combinación con una capa de cubierta captura las partículas más grandes para evitar alarmas de obstrucción.
2. Estéril. Libre de látex, hipoalergénico.
3. Tamaño de los orificios de 400 a 600 micras para generar mejor y más tejido de granulación de manera simétrica.
5. De un solo uso.
6. 2 Láminas V.A.C.® Drape avanzado; plástico adhesivo semi-oclusivo, que permiten cubrir las heridas para que se aplique la presión negativa e instilación de soluciones. Cada lamina de V.A.C.® Drape avanzado corresponde a una medida de 20 x 18 cm. Apósito transparente.
7. Incluye tubería Veratrac®, tubos de silicona doble; para terapia de presión negativa bidireccional con 5 lúmenes. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ y lumen para instilación. Anti colapsable.
8. Contiene 2 sachet de protector cutáneo Cavilón 3M™.

instila alguna solución permitiendo lavar la herida y tratar infecciones más resistentes que generan un biofilm. Granulando un 43% más rápido que los apósitos V.A.C.® tradicionales. La capa de poros más grandes permite desbridar el tejido esfacelado.

### Indicaciones:

***Dispositivo usado para el manejo avanzado de heridas, está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo; diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos, entre otras. Heridas infectadas en presencia de material ortopédico o implantes de articulaciones.***

***Heridas infectadas con presencia de biofilm, heridas donde se necesiten aseos frecuentes o donde se dese granular más rápido.***

### Precauciones:

Debe conseguirse la hemostasia antes de aplicar el apósito y tomarse precauciones en los siguientes casos:

- ❖ Tratamiento anticoagulante o inhibidores de la agregación plaquetaria.
- ❖ Pacientes con problemas de hemostasia.
- ❖ Sangrado abundante o debilidad en vasos sanguíneos u órganos.
- ❖ Mal nutrición no tratada.
- ❖ Pacientes con mala disposición o agresivos.
- ❖ Pacientes con heridas muy próximas a vasos sanguíneos o aponeurosis delicada.
- ❖ En pacientes con órganos o vísceras expuestas, utilizar en combinación con apósito Whitefoam V.A.C.®.

### Contraindicaciones:

- ❖ Fístulas no entéricas sin explorar.
- ❖ Osteomielitis no tratada.
- ❖ Heridas malignas (excepto para mejorar la calidad de vida).
- ❖ Tejido necrótico con presencia de escaras.  
Pacientes con riesgo de hemorragias o fuga intestinal.



V.A.C.® VERAFLO CLEANSE CHOICE™ Dressing Kit – Medium contiene tres esponjas de alta densidad de 18 x 12,5 cm 2 láminas de adhesivo avanzado V.A.C. Drape 20 x 18 cm, 1 regla con etiqueta engomada, 2 sachet de Cavilon™ y un VERAT.R.A.C™

Opciones de Orden	Código de Producto
Unidad	ULTVCC05MD

